

Vaš CONTOUR®PLUS Mjerač



Prikaz

Tipke za pomjeranje prema gore/dolje

Otvor za test traku

Tipka memorije (Uključen/Isključen, Pozivanje iz memorije, Unos)

Koristite samo CONTOUR®PLUS test traku

Sivi kraj: Umetnite ovaj kraj u otvor za test traku.

Vrh za uzorak: Ovdje se uvlači uzorak krvi.



Detaljne upute potražite u CONTOUR®PLUS Uputstvu za upotrebu i MICROLET®2 materijalu.

UPOZORENJE

Ruke uvijek dobro operite sapunom i vodom i osušite ruke prije i poslije testiranja, rukovanja mjeračem, lancetom ili test trakama.

Potencijalna biološka opasnost
Svi sistemi za mjerenje glukoze u krvi smatraju se biološki opasnim. Zdravstveni radnici ili lica koja primjenjuju ovaj sistem na veći broj pacijenata moraju slijediti postupak kontrole infekcije koji odobrava njihova ustanova. Sve proizvode ili predmete koji dođu u kontakt s ljudskom krvlju treba, čak i nakon čišćenja, tretirati kao moguće prijenosnike virusnih bolesti. Korisnik treba slijediti preporuke za preventivu krvno prenosivih bolesti u zdravstvenom okruženju u skladu s preporukama za potencijalno zarazne ljudske uzorke.

Osnovno testiranje – jagodica prsta


OPREZ: Lancetar MICROLET 2 namijenjen je samotestiranju jednog pacijenta. Ne smije se koristiti za više od jedne osobe zbog rizika od infekcije.

1. Skinite poklopac s lancetara MICROLET 2.

2. Olabavite okruglu zaštitnu kapicu na lancetu okrećući je za četvrtinu kruga, ukloniti je nemojte otkinuti.

3. Čvrsto umetnite lancetu dok ne dođe do kraja i ponovno aktivira instrument.

4. Odvrnite okruglu zaštitnu kapicu lancete.

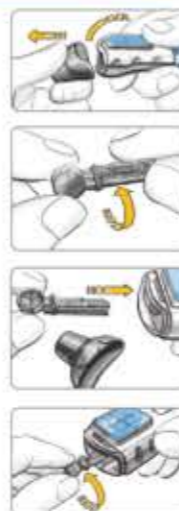


5. Vratite poklopac prije uzimanja krvi.

6. Namjestite brojčanic na poklopcu na željenu dubinu uboda.

7. Umetnite sivi kraj test trake u otvor za test traku na mjeraču.

Mjerač će se uključiti, a na prikazu će se prikazati test traka s treperećom kapljicom krvi.

8. Snažno pritisnite vrh lancetara na prst, a palcem pritisnite plavo dugme za otpuštanje. Masirajte ruku i prst u smjeru uboda da biste stvorili kapljicu krvi.

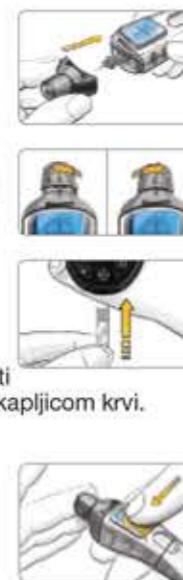

9. Odmah prislonite vrh test trake na kapljicu krvi.

Držite vrh test trake na kapljici krvi dok mjerač ne zapišti.

Ako prva kapljica krvi nije dovoljna, mjerač će dvaput zapištati. Imate oko 30 sekundi da na istu traku stavite još krvi.

Rezultat će se pokazati nakon 5 sekundi.

10. Da biste isključili mjerač, izvucite test traku.



Iskorištenu test traku uklanjajte kao ukloniti otpad ili na način koji vam savjetuje vaš ljekar.

Uklanjanje iskorištene lancete

1. Držite lancetar palcem na žiljebu za bolje držanje i poklopcu, kao što je prikazano. Pažljivo otrgnite poklopac.



2. Položite okruglu zaštitnu kapicu lancete na ravnu površinu s Bayerovim logom okrenutim prema dolje.



3. Dok je iskorištena lanceta još u lancetaru, gurnite iglu lancete u sredinu zaštitne kapice.

4. Izbacite lancetu u kontejner prema uputama iz materijala o lancetaru.

5. Vratite poklopac na mjesto.

Korištenje Dodatnih mogućnosti

Postavljanje mjerača na Dodatne mogućnosti

Da biste postavili svoj mjerač na Dodatne mogućnosti i iskoristili mogućnosti označavanja jela i druge dostupne funkcije:

1. Pritisnite **M** da biste uključili mjerač.
2. Pritisnite i držite **▲** ili **▼** 3 sekunde.
3. Zatreperit će L-1.
4. Pritisnite **▲** ili **▼** da promijenite na L-2.
5. Pritisnite **M** da biste postavili.



Saznajte kako vam te dodatne mogućnosti mogu pomoći u kontroli dijabetesa.

Obratite se korisničkoj podršci
Bayer Diabetes Care, na broj 387 33 202 183
www.bayerdiabetes.com

Kada ste obavili test i vidjeli rezultate, upotrijebite markere na prikazu:

Za označavanje rezultata	Vidjet ćete	Za postavljanje	Vidjet ćete	Šta to znači	Korištenje alarma
Prije jela Označava rezultat testiranja obavljen prije jela. Pritisnite ▲ ili ▼	(Treperi)	Pritisnite M		Rezultat je označen kao testiranje prije jela. Ponovno pritisnite M da biste postavili alarm da vas podsjeti na testiranje nakon jela.	Kada se alarm oglasi, mjerač će se uključiti, a vi ćete vidjeti rezultat testiranja prije jela. Pritisnite bilo koje dugme jednom da biste utišali alarm ili dvaput da biste isključili mjerač. Ponovite test krvi i označite ga oznakom poslije jela (vidi grafikon na lijevoj strani).
Poslije jela Označava rezultat testiranja obavljen nakon jela. Pritisnite ▲ ili ▼	(Treperi)	Pritisnite M		Rezultat je označen kao testiranje poslije jela.	
Dnevnik Označava rezultat kao jedinstven ili na neki način različit. Pritisnite ▲ ili ▼	(Treperi)	Pritisnite M		Rezultat je u memoriji označen kao jedinstven. To biste trebali unijeti u svoj dnevnik.	

Postavlja alarm (unaprijed postavljen na 2 sata) za obavljanje testiranja nakon jela. Detaljne upute o korištenju oznaka i postavljanju vremena za alarm potražite u Uputstvu za korištenje.

Kodovi i simboli pogrešaka

Potpunu listu potražite u Uputstvu za korištenje.

E1	Temperatura izvan raspona.
E2	Pojavio se problem kod punjenja test trake. Ponovite testiranje koristeći novu traku.
E3	Mjerač je prepoznao iskorištenu test traku ili pogrešan kontrolni rastvor. Ponovite testiranje koristeći novu traku.
E11	Abnormalan rezultat. Ponovite testiranje koristeći novu traku.

Bayer HealthCare
Naziv nosioca dozvole za stavljanje u promet: Intermedical d.o.o. Branilaca Sarajeva 20 7100 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland

0088

Bayer

81528128
Rev. 02/13